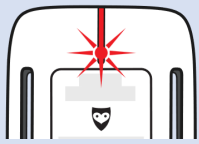
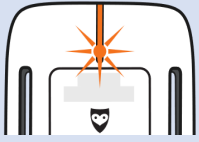
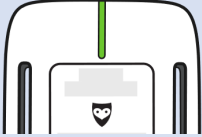


Lichtindicator	Geluid	Betekenis
 Knipperend 	Snelle piepmelodie 	Mogelijk epileptische aanval gedetecteerd Controleer de sensordrager en verleen hulp volgens de instructies van uw zorgverlener. Druk op een van beide knoppen om het alarm te bevestigen en het geluid te pauzeren. Na 3 minuten wordt de aanvalsdetectie automatisch hervat.
 Knippert 1x repeterend 	Monotone melodie van drie piepjes 	Kan hartslag niet volgen Controleer of de sensor correct gedragen is. Druk op een van beide knoppen om dit het geluid te pauzeren.
 Knippert 2x repeterend 	Aflopende melodie van drie piepjes 	Buiten bereik De afstand tussen het alarmstation en de sensor is te groot of de sensor is uitgeschakeld. Druk op een van beide knoppen om dit het geluid te pauzeren.
 Knippert 4x repeterend Knippert 4x repeterend 	Stijgende melodie van drie piepjes 	Batterij van sensor bijna leeg, Laad de sensor op. Druk op een van beide knoppen om dit het geluid te pauzeren.
 Alles uit	Continue toon 	Het alarmstation heeft geen stroom, Controleer de stroomaansluiting. Opmerking: Als u op een van beide knoppen drukt, wordt het alarmstation uitgeschakeld.
 	Alarmsignalen pauzeren Met uitzondering van het alarm "geen stroom" kunnen alle bovenstaande alarmen worden gepauzeerd door op een van de volumeknoppen op het alarmstation te drukken. Een groen knipperend lampje, samen met de alarmlampjes die al aan staan, geven aan dat dit alarm tijdelijk is gepauzeerd. Nieuwe alarmen zijn hoorbaar.	

Lichtindicator	Geluid	Betekenis
 Knipperend 	Geen	De hartslag wordt bijgehouden en de drager is nog niet in rust. De drager heeft nog geen 2 minuten in horizontale positie gerust (geen beweging) of is recentelijk rechtop gekomen. NightWatch+ staat in een lagere gevoeligheidsinstelling voor het detecteren van aanvallen, maar is operationeel.
 Continu aan 	Geen	De hartslag wordt bijgehouden en de drager is in rust. De drager heeft 2 minuten in rust (geen beweging) gelegen in een horizontale positie. NightWatch+ staat in de hoogste gevoeligheidsstand voor het detecteren van aanvallen.
 Blauw/Groen Knipperend 	Geen	De sensor is aangesloten op de oplader en wordt opgeladen.
 Blauw/Groen Continu aan 	Geen	De sensor is aangesloten op de oplader en is volledig opgeladen. Koppel de sensor los van de oplader om de opname te starten.

NightWatch+ heeft een lage gevoeligheid en een hoge gevoeligheid voor het detecteren van aanvallen.

Lage gevoeligheid

Als de sensor uit de oplader wordt gehaald en de hartslag wordt gemeten, dan gaat het groene lampje op het alarmstation knipperen. NightWatch+ is nu in een aanvalsdetectiestatus met een lage gevoeligheid. De aanvalsdetectie wordt alleen geactiveerd door grotere schud bewegingen of een lage hartslag.

Hoge gevoeligheid:

Als de sensor een hartslag meet, in een hoek van minder dan 45 graden ligt en gedurende 2 minuten weinig tot geen beweging detecteert, dan gaat het groene lampje op het alarmstation continu branden. De NightWatch+ interpreteert dan dat de drager in rust ligt. NightWatch+ is nu in een hoog gevoelige aanvalsdetectiestatus. De aanvalsdetectie kan geactiveerd worden door kleinere bewegingen en/of hartslagveranderingen. Als er een epilepsie alarm klinkt of als de drager uit bed stapt of rechtop gaat zitten, dan daalt de gevoeligheid naar laag.

Meer informatie over het gebruik van NightWatch+ vind je in de gebruikershandleiding.
Stuur een e-mail naar helpdesk@nightwatchepilepsy.com met vragen of problemen.