

# Installatie voor Windows


NightWatch Update (v132)



Dit document beschrijft stap voor stap hoe u de applicatie 'NightWatch Updater' kunt installeren op uw **Windows** computer (geen tablet). Met deze applicatie kunt u uw NightWatch updaten zodat u gebruik kunt maken van het vernieuwde Portaal.

## Stap 1


Download het bestand 'NightWatchUpdater-20191129.exe'. U kunt dit bestand downloaden op [www.nightwatch.nl/update](http://www.nightwatch.nl/update). Klik op de knop 'Windows' om de download te starten.

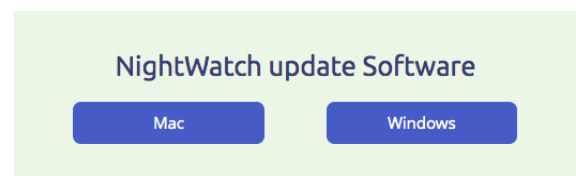

1. Download het bestand via [www.nightwatch.nl/update](http://www.nightwatch.nl/update)

## Stap 2

Zoek het gedownloade bestand 'NightWatchUpdater-20191129.exe' op uw computer (kijk in uw 'Downloads' folder). Dubbelklik op dit bestand om het installatiebestand te openen.

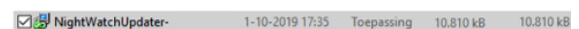

2. Zoek en open de applicatie

## Stap 3


Aangezien de uitgever van deze applicatie onbekend is, dient u door een extra beveiligingsmelding heen te klikken. Klik hiervoor op 'Ja'.



3. Klik bij deze beveiligingsmelding op 'Ja'

## Stap 4


Het installatie programma heeft zich nu geopend. Klik op 'Next >'.

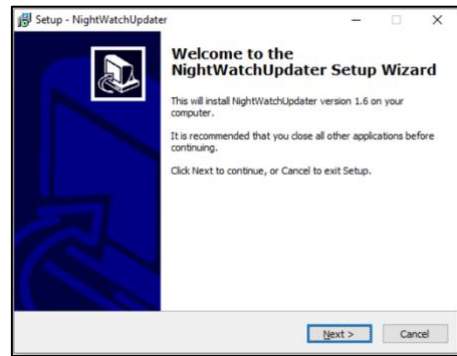

4. Klik op 'Next >'

## Stap 5


Klik bij het volgende scherm direct op 'Next >' tenzij u de locatie van het installatiebestand wilt wijzigen.

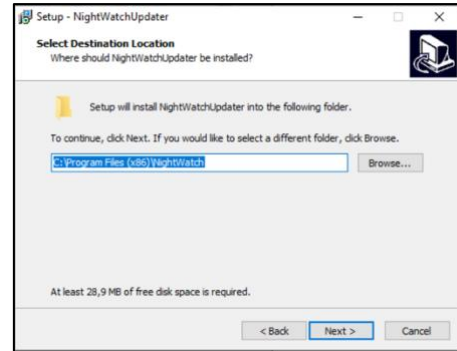

5. Klik op 'Next >'

## Stap 6


Klik bij het volgende scherm direct op 'Next >'.

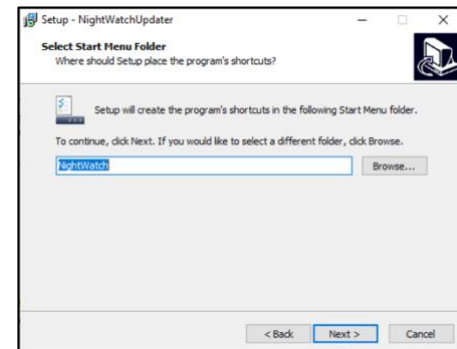

6. Klik op 'Next >'

## Stap 7


Vink bij het volgende scherm de optie 'Create a desktop icon' aan wanneer u het programma vanaf uw bureaublad wilt kunnen openen (aanbevolen).

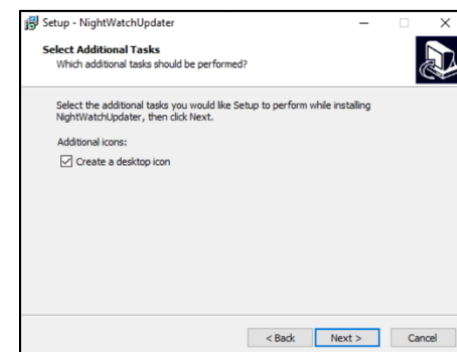

7. Vink 'Create a desktop icon' aan en klik op 'Next >'

## Stap 8


Klik bij het volgende scherm op 'Install' om het programma te installeren.

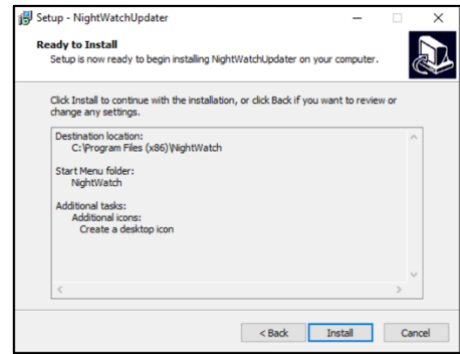

8. Klik op 'Install'

## Stap 9


De NightWatch Updater applicatie is nu geïnstalleerd. Wanneer u de optie 'Launch NightWatchUpdater' selecteert, zal het programma zich direct openen als u vervolgens op 'Finish' klikt.

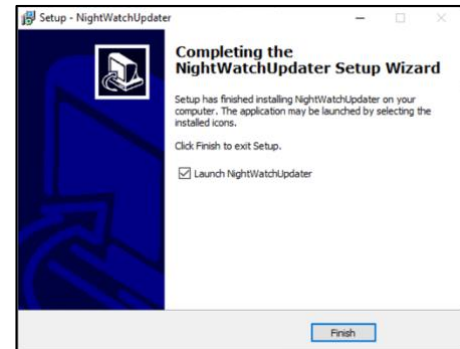

9.. Klik op 'Finish' en het programma zal zich openen.

## Stap 10

De applicatie is nu geopend. Klik rechts bovenin op de knop 'Info' voor uitleg en informatie over dit programma.

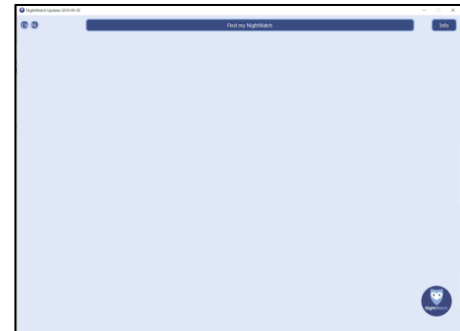

10. De applicatie is geopend. Klik rechts bovenin op 'Info' voor meer informatie.