


# Comment connecter NightWatch au portail en ligne

NightWatch enregistre automatiquement toutes les données mesurées sur le portail en ligne. Vous pouvez examiner les données après chaque nuit pour plus d'informations et de compréhension des événements détectés par NightWatch. Le portail en ligne est un service gratuit dont les performances sont continuellement améliorées et alignées sur les besoins du marché. Vous pouvez rencontrer des améliorations périodiques et des retards occasionnels dans le traitement des données.

## 1. Assurez-vous que votre station de base NightWatch est allumée et que vous disposez d'une connexion Internet fonctionnelle.

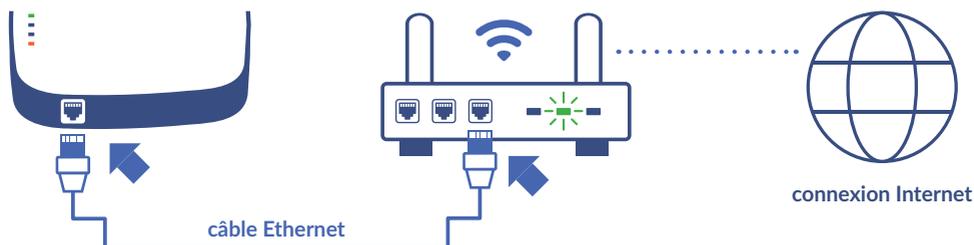


## 2. Connectez votre station de base NightWatch à votre routeur via un câble Ethernet.

Trouvez un point d'accès Internet dans votre bâtiment qui soit le plus proche de votre station de base NightWatch et utilisez un câble Ethernet standard pour connecter les deux.

## 3. C'est connecté !

Après quelques minutes, deux voyants orange sur votre base confirment que NightWatch est connecté au portail. Assurez-vous que le NightWatch reste connecté pendant la nuit.

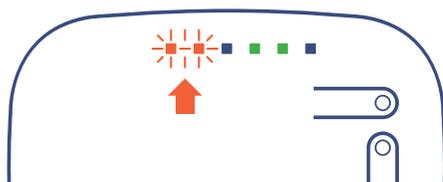

## Comment connecter la station de base NightWatch à un routeur plus éloigné ?



Si le point d'accès le plus proche est trop éloigné pour une connexion par câble, nous vous recommandons de relier la connexion avec un adaptateur Powerline plug-and-play, un répéteur Wi-Fi ou un routeur mobile.

Visitez notre site Web pour des solutions alternatives pour connecter la station de base à votre routeur.



[nightwatchepilepsy.com/fr/connect-online-portal](https://nightwatchepilepsy.com/fr/connect-online-portal)

# Démarrez avec le portail en ligne NightWatch

## 1. Cherchez votre numéro unique au dos de la station de base NightWatch.



Le numéro unique de votre NightWatch est nécessaire pour accéder au portail en ligne. Votre numéro unique se trouve sur l'autocollant blanc au dos de votre station de base. **Cherchez le numéro qui débute par MAC.** Votre numéro unique est composé des 4 derniers caractères. Donc, dans l'exemple ci-dessus, **le numéro unique est 02F2.**

## 2. Connectez-vous au portail NightWatch pour la première fois avec votre numéro unique.

Connexion

Vous pouvez vous connecter au portail NightWatch via :

[portal.nightwatchepilepsy.com](https://portal.nightwatchepilepsy.com)

Attention : le mot de passe est sensible à la casse.

### C'est tout !

Vous pouvez désormais naviguer à travers les différentes nuits, créer des aperçus ou zoomer sur des moments spécifiques pour mieux comprendre les événements enregistrés.

### Que faut-il faire si les deux voyants orange de la base ne sont pas allumés ?

Redémarrez d'abord la station de base. Si les deux voyants orange de la station de base ne s'allument toujours pas, veuillez contacter notre Service de soutien.

[info@nightwatch.fr](mailto:info@nightwatch.fr)  
+33 (0)9 85 40 15 71

### Contactez le service d'assistance NightWatch pour plus d'informations.

[nightwatchepilepsy.com/fr/helpdesk](https://nightwatchepilepsy.com/fr/helpdesk)



### Veuillez consulter notre déclaration de confidentialité sur la manière dont nous collectons et utilisons les données.

