


# Hoe NightWatch te verbinden met de Online Portal

NightWatch slaat alle gemeten data automatisch op in de Online Portal. De gegevens kunnen na elke nacht worden teruggekeken voor meer inzicht en begrip van de door NightWatch gedetecteerde gebeurtenissen. De Online Portal is een gratis dienst waarvan de prestaties voortdurend worden verbeterd en afgestemd op de behoeften van de markt. Het is mogelijk dat u periodieke verbeteringen en incidentele vertragingen in de gegevensverwerking ervaart.

## 1. Zorg ervoor dat uw NightWatch basisstation aan staat en dat u een werkende internetverbinding heeft.

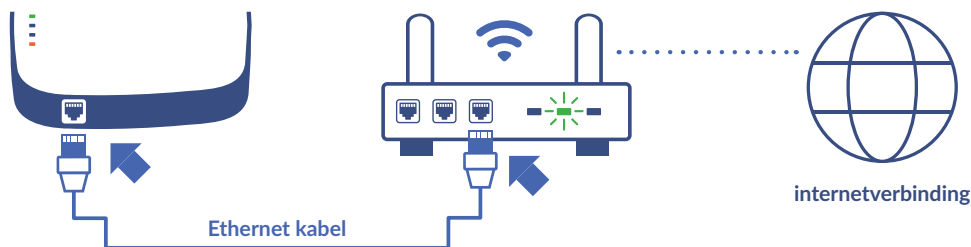


## 2. Verbind uw NightWatch basisstation met uw router via een Ethernet kabel.


Zoek een internet toegangspunt in uw gebouw dat het dichtst bij uw NightWatch basisstation is en gebruik een standaard Ethernet kabel om beide te verbinden.

## 3. Klaar!

Na een paar minuten bevestigen **twee oranje lampjes** op uw basisstation dat NightWatch is verbonden met het portaal. Zorg ervoor dat NightWatch 's nachts verbonden blijft.

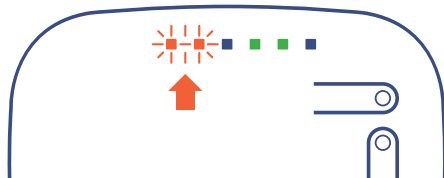

## Hoe verbind ik het Nightwatch basisstation met een router die verder weg staat?

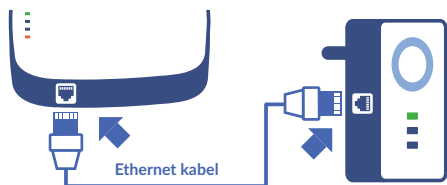

Als het dichtstbijzijnde toegangspunt te ver weg is voor een kabelverbinding, dan raden wij aan de verbinding te overbruggen met een **plug-and-play Powerline adapter**, WiFi repeater of Mobile Router.

Bezoek onze website voor andere oplossingen om het basisstation op je router aan te sluiten.



[nightwatchepilepsy.com/connect-online-portal](https://nightwatchepilepsy.com/connect-online-portal)

# Aan de slag met de NightWatch Online Portal

## 1. Zoek uw unieke nummer op de achterkant van het Nightwatch basisstation.



U heeft het unieke nummer van uw NightWatch nodig om toegang te krijgen tot de Online Portal. Uw unieke nummer vindt u op de witte sticker op de achterkant van uw basisstation. **Zoek het nummer dat begint met MAC.** Uw unieke nummer bestaat uit de laatste 4 karakters. **Dus in het voorbeeld hierboven is het unieke nummer 02F2.**

## 2. Log voor de eerste keer in op de Nightwatch Portal met uw unieke nummer.

Please login

U kunt inloggen op de NightWatch portal via:

[portal.nightwatchepilepsy.com](https://portal.nightwatchepilepsy.com)

Let op: het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

### Dat is het!

U kunt nu door verschillende nachten navigeren, overzichten maken, of inzoomen op specifieke momenten om meer inzicht te krijgen in de opgenomen gebeurtenissen.



### Wat als de twee oranje lampjes op het basisstation niet branden?

Start het basisstation eerst opnieuw op. Als de twee oranje lampjes op het basisstation nog steeds niet branden, neem dan contact op met onze Support Service.

[info@nightwatch.nl](mailto:info@nightwatch.nl)  
+31 (0)85 06 01 252

### Neem contact op met NightWatch Support Service voor meer informatie.

[www.nightwatch.nl/helpdesk](https://www.nightwatch.nl/helpdesk)



### Bekijk hoe we gegevens verzamelen en gebruiken in onze privacyverklaring.

