

Installation pour Windows

Mise à jour de NightWatch (v15.5)



Ce document donne des instructions étape par étape pour installer l'application « NightWatch Updater » sur votre ordinateur Windows (pas sur votre tablette). Vous pouvez utiliser cette application pour mettre à jour votre NightWatch vers la version la plus récente.

Étape 1


Téléchargez le fichier « NightWatchFwUpd-20220412_v155 ». Vous pouvez télécharger ce fichier sur <https://www.nightwatchepilepsy.com/update>. Cliquez sur le bouton « Logiciel de mise à jour – Windows » pour lancer le téléchargement.



1. Téléchargez le fichier via [nightwatchepilepsy.com/update](https://www.nightwatchepilepsy.com/update)

Étape 2

Recherchez le fichier « NightWatchFwUpd-20220412_v155 » téléchargé sur votre ordinateur (cliquez sur votre dossier « Téléchargements »). Double-cliquez sur ce fichier pour ouvrir le fichier d'installation.

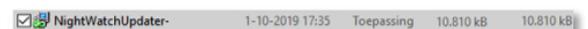

2. Rechercher et ouvrir l'application.

Étape 3


Vous devez cliquer sur une notification de sécurité supplémentaire car l'éditeur de cette application est inconnu. Cliquez sur « Oui » pour cela.



3. Cliquez sur « Oui » pour cette notification de sécurité.

Étape 4


Le programme d'installation est maintenant ouvert. Cliquez sur « Suivant > ».

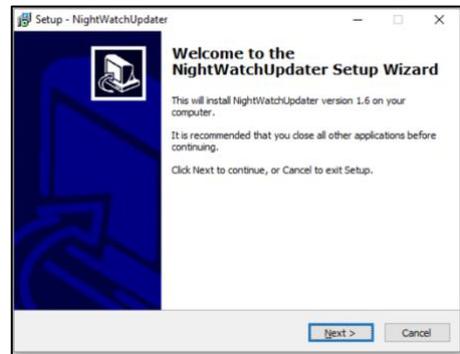

4. Cliquez sur « Suivant > ».

Étape 5


Sur l'écran suivant, cliquez sur « Suivant > » sauf si vous souhaitez modifier l'emplacement du fichier d'installation.

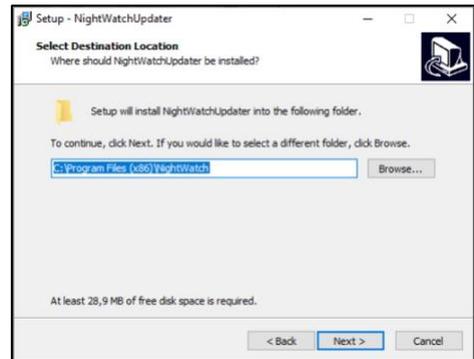

5. Cliquez sur « Suivant > ».

Étape 6


Sur l'écran suivant, cliquez sur « Suivant > ».

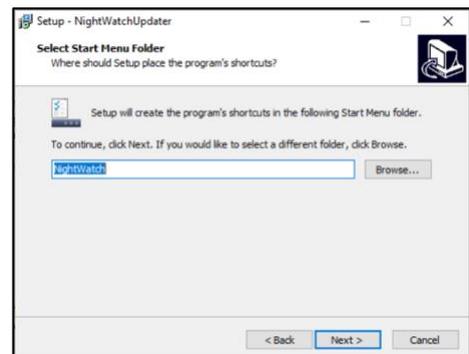

6. Cliquez sur « Suivant > ».

Étape 7


Cochez la case de l'option « Créer une icône de bureau » sur l'écran suivant si vous souhaitez pouvoir ouvrir l'application à partir de votre bureau (recommandé).

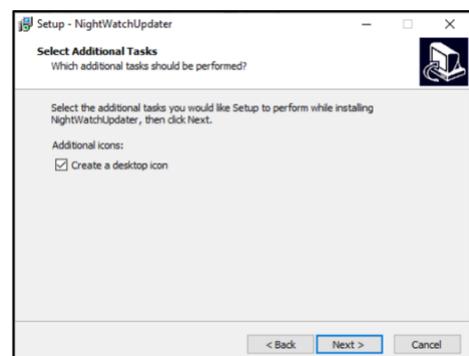

7. Cochez la case « Créer une icône de bureau » et cliquez sur « Suivant > ».

Étape 8


Cliquez sur « Installer » sur l'écran suivant pour installer l'application.

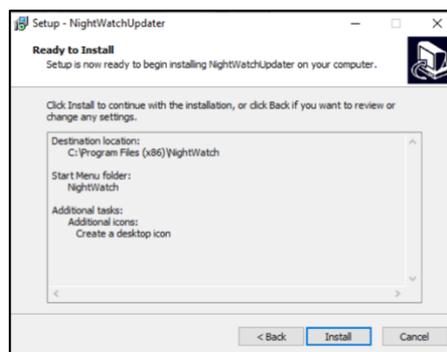

8. Cliquez sur « Installer ».

Étape 9

L'application NightWatch Updater est maintenant installée. Si vous sélectionnez l'option « Lancer NightWatchUpdater », l'application s'ouvrira immédiatement après avoir cliqué sur « Terminer ».

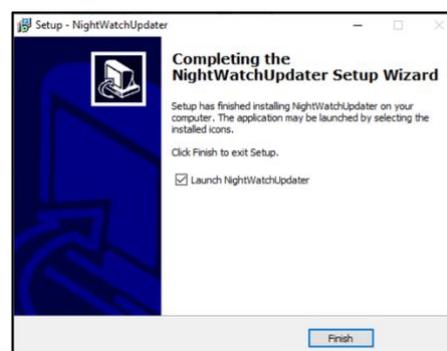

9. Cliquez sur « Terminer » et l'application s'ouvrira.

Étape 10

L'application est maintenant ouverte. Cliquez sur le bouton « Info » en haut à droite pour obtenir une explication et des informations sur cette application.



10. L'application est ouverte. Cliquez sur le bouton « info » en haut à droite pour obtenir une explication et des informations sur cette application.