

## App voor NightWatch Portal: “Helpilepsy”

NightWatch en Neuroventis hebben haar online platforms laten samenwerken!

Helpilepsy is een gratis te downloaden app ontwikkeld door Neuroventis. Het wordt gebruikt door mensen met epilepsie die onder andere hun aanvalsdagboek en medicatie inname eenvoudig willen bijhouden. Deze gegevens worden inzichtelijk gemaakt voor de neuroloog om het behandelplan beter in de gaten te kunnen houden.

Het is nu mogelijk om via de Helpilepsy app de NightWatch Portal te gebruiken. Geregistreerde alarmen en rapporten van NightWatch worden automatisch in de app opgeslagen.

### **Wat kan ik ermee?**

- Ontvang push notificaties via de app bij NightWatch alarmen
- Mobiele weergave van rapporten, snel bij de hand via de app
- Inzage in rapporten zonder in te hoeven loggen.
- Delen van rapporten door de link door te sturen.
- Gebruik maken van vele Helpilepsy functies

### **Hoe koppel ik mijn NightWatch Portal aan de Helpilepsy app?**

1. Download de gratis app via uw telefoon (tablet):
  - o [Apple](https://apps.apple.com/nl/app/helpilepsy-epilepsy-assistant/id1276141618?ls=1) (<https://apps.apple.com/nl/app/helpilepsy-epilepsy-assistant/id1276141618?ls=1>)
  - o [Android](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.helpilepsy.app&hl=nl) (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.helpilepsy.app&hl=nl>)
2. Open de app en maak gratis een account aan.
3. Ga in de app naar instellingen (tandwiel rechts onderin). Ga vervolgens naar beneden naar ‘Mijn devices’. Klik op ‘Mijn NightWatch van LivAssured’.
4. Log in zoals u gewend bent in te loggen bij NightWatch Portal.
5. Klaar!

Laat ons weten wat u ervan vindt! Lees [hier](#) meer over [Helpilepsy](#).