


1. La estación de base

- Enchufe la estación de base a la toma de corriente (30 segundos de inicialización).
- Ajuste el volumen manteniendo pulsados los botones A o B. Suelte el botón en cuanto haya alcanzado el nivel de volumen deseado.
- En el reverso de esta guía rápida encontrará el resumen de los avisos que la estación de base puede emitir.

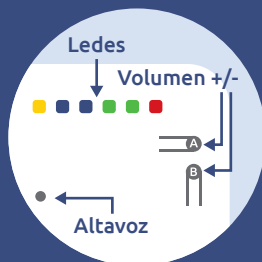

2. El módulo de brazo

- Cuando el módulo de brazo no se utiliza, debe estar conectado al cargador.
- El sistema se iniciará automáticamente al desconectar el módulo de brazo del cargador. La estación de base emitirá un pitido único repetido, hasta que detecte la frecuencia cardíaca.
- El módulo de brazo debe colocarse alrededor del brazo superior. La mejor posición es la parte frontal del brazo, en el bíceps. Los LEDs verdes en el módulo de brazo que miden la frecuencia cardíaca deben entrar en contacto directo con la piel, sin la manga del pijama entremedio.



3. Funcionamiento

- Desconecte el módulo de brazo del cargador y colóquelo alrededor del brazo superior.
- Pasados unos momentos se detectará la frecuencia cardíaca y el led rojo intermitente ahora empezará a parpadear en color verde.
- Cuando el portador esté en reposo durante 2 minutos, el led verde se iluminará permanentemente.
- Ahora el NightWatch está completamente activado para registrar los ataques.
- Tras el descanso nocturno, debe retirar el módulo de brazo y conectarlo al cargador.











4. Lo que debe saber...

- Tras la notificación de un ataque, la estación de base se reiniciará automáticamente al cabo de 3 minutos. El sonido de alerta también se detendrá pasados los 3 minutos si no se apaga manualmente.
- Cualquier sonido emitido por la estación de base puede detenerse al pulsar el botón A o B de la estación de base. Las señales de luz de la estación de base no se detienen con el botón.
- El módulo de brazo debe estar encendido en todo momento. Sólo utilice el interruptor de encendido/apagado para ahorrar la batería cuando lo transporta. Utilice un bolígrafo o lápiz para deslizar el interruptor de encendido/apagado situado en la parte inferior del módulo de brazo.

• El módulo de brazo no podrá cargarse cuando esté desactivado.

• NightWatch puede no detectar un ataque u alertarle cuando no haya un ataque. Por favor póngase en contacto con nosotros si piensa que su NightWatch no está funcionando adecuadamente.

Aviso	Sonido	Significado
<p>Intermitente</p> 	<p>La estación de base emite un sonido de timbre como un teléfono</p>	<p>Ataque detectado, ¡acuda al el portador del módulo de brazo!</p> 
<p>1x cada 2 segundos</p> 	<p>La estación de base pita 1x cada 2 segundos</p>	<p>Mala detección de la frecuencia cardíaca durante 2 minutos o más.</p> 
<p>2x cada 2 segundos</p> 	<p>La estación de base pita 2x cada 2 segundos</p>	<p>Falta de intercambio de datos durante 2 minutos o más. Demasiada distancia entre la estación de base y el módulo de brazo, o el módulo de brazo está apagado.</p> 
<p>4x cada 2 segundos</p> 	<p>La estación de base pita 4x cada 2 segundos</p>	<p>La batería del módulo de brazo está agotada.</p> 
<p>Continuo</p> 	<p>Ninguno</p>	<p>Modo de alerta activado. La frecuencia cardíaca se mide y el portador lleva 2 minutos en reposo horizontal.</p>
<p>Parpadea</p> 	<p>Ninguno</p>	<p>La frecuencia cardíaca se mide, pero el portador aún no lleva 2 minutos en reposo horizontal.</p>
<p>Continuo</p> 	<p>Ninguno</p>	<p>El módulo de brazo está conectado al cargador. El módulo de brazo se ha cargado completamente.</p>
<p>Continuo / parpadea</p> 	<p>Ninguno</p>	<p>El módulo de brazo está conectado al cargador. El módulo de brazo sigue cargándose.</p>