


1. Die Basisstation

- Basisstation mit Netzstecker ans Stromnetz anschließen (Inbetriebnahme dauert ca. 30 Sekunden)
- Die gewünschte Lautstärke durch gedrückt halten der Taste A oder B einstellen. Nach dem Loslassen ist zuletzt gehörter Lautstärkepegel eingestellt
- Eine Übersicht über die LED- und Ton-Signale der Basisstation befindet sich auf der Rückseite dieser Kurzanleitung

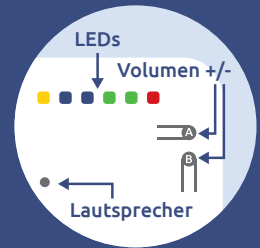


2. Das Armmodul

- Einschalten: Sicherheits-Schieber auf der Rückseite von „OFF“ auf „ON“ schieben
- Wenn das Armmodul nicht verwendet wird, verbinden Sie es bitte mit dem USB-Ladegerät
- Das System startet automatisch, wenn man das Armmodul vom Ladekabel trennt. Die Basisstation piept dann wiederholend 1x, bis ein Herzschlag gefunden wurde.
- Das Armmodul muss am Oberarm (oder der Alternativposition Bein) angelegt werden. Am besten sitzt es auf der Vorderseite des Armes auf dem Bizeps. Das Armmodul bitte direkt auf der Haut anlegen, damit die Sensoren gut messen können.



3. Betrieb

- Armmodul vom Ladekabel trennen und am Oberarm (oder Alternativposition) anlegen
- Bitte vergewissern Sie sich, dass der Sitz gut ist, aber nicht zu straff (evtl. elastisches Band anpassen)
- Nach kurzer Zeit erkennen die Sensoren die Herzfrequenz und das rote Blinklicht blinkt grün
- Wenn der Träger 2 Minuten lang ruhig liegt, leuchtet das grüne Licht kontinuierlich
- Die NightWatch ist nun aktiviert, um epileptische Anfälle zu erkennen
- Nach der Nachtruhe schiebt man das Armmodul wieder vom Arm und schließt es wieder an das Ladekabel an

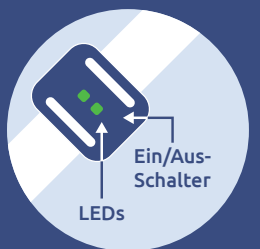













4. Gut zu wissen...

- Der Klingelton bei einem gemeldeten Anfall stoppt nach 3 Minuten automatisch, wenn er nicht vorher manuell ausgeschaltet wird. Nach einer Anfallsmeldung setzt sich die Basisstation nach 3 Minuten automatisch zurück.
- Jeder Klingelton der Basisstation lässt sich durch Drücken der Taste A oder B an der Basisstation ausschalten. Die LED-Signale der Basisstation werden durch Drücken der Tasten nicht ausgeschaltet
- Das Armmodul sollte immer auf „ON“ sein. Schalten Sie das Armmodul nur auf „OFF“, wenn Sie es transportieren wollen (Batterie sparen). Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber, um den Schieber von der einen in die andere Position zu schieben.

• Das Armmodul kann nur geladen werden, wenn der Schieber auf „ON“ steht

• NightWatch kann epileptische Anfälle übersehen oder alarmieren, obwohl kein Anfall stattfindet. Nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf, wenn Sie Probleme bei der Anwendung erfahren

Meldung	Klingelton	Bedeutung
<p>Blinkend</p> 	Die Basisstation macht ein klingelndes Telefongeräusch	<p>Epileptischer Anfall wahrgenommen, man sollte nach dem Träger des Armmoduls sehen!</p> 
<p>1x alle 2 Sekunden</p> 	Basisstation piept alle 2 Sekunden 1x	<p>Es wurde 2 Minuten oder länger eine schlechte Zuverlässigkeit der Pulsmessung wahrgenommen.</p> 
<p>2x alle 2 Sekunden</p> 	Basisstation piept alle 2 Sekunden 2x	<p>Es wurden 2 Minuten oder länger keine Daten ausgetauscht. Abstand zwischen Basisstation und Armmodul ist zu groß oder das Armmodul ist ausgeschaltet.</p> 
<p>4x alle 2 Sekunden</p> 	Basisstation piept alle 2 Sekunden 4x	<p>Die Batterie des Armmoduls ist leer</p> 
<p>Kontinuierlich</p> 	Kein	<p>Alarm ist aktiv. Der Puls wird gemessen und der Träger hat 2 Minuten ruhig horizontal gelegen.</p>
<p>Blinkt</p> 	Kein	<p>Der Puls wird gemessen, aber der Träger hat weniger als 2 Minuten ruhig horizontal gelegen.</p>
<p>Kontinuierlich</p> 	Kein	<p>Das Armmodul ist mit dem Ladegerät verbunden. Das Armmodul ist vollständig geladen.</p>
<p>Kontinuierlich/Blinkend</p> 	Kein	<p>Das Armmodul ist mit dem Ladegerät verbunden. Das Armmodul wird noch aufgeladen.</p>